


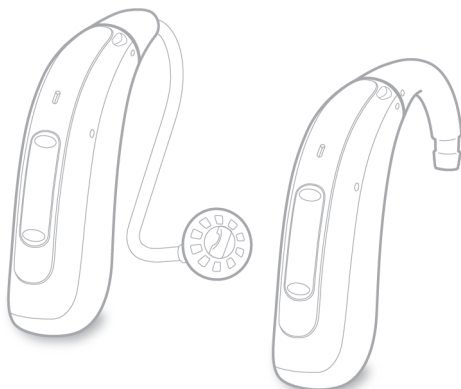

Motion C&G P X

دفترچه راهنما



Made for

Apple iPhone | iPad | iPod

دفترچه راهنما

خوش آمدگویی

سمعک شما

سمعک شما
نوع سمعک
آشنایی با سمعک
اجزا و نام آنها
کنترل‌ها
برنامه‌های شنیداری
ویژگی‌ها

استفاده روزانه

شارژ کردن
خاموش و روشن کردن
انتخاب حالت آماده بکار
قرار دادن و برداشتن سمعک
تنظیم ولوم صدا
تغییر برنامه شنیداری
تنظیمات دیگر (اختیاری)

موقعیت‌های خاص شنیداری

در حالت تلفن

ارتباط مستقیم صوتی با گوشی آیفون

حالت پرواز

لوپ صوتی القایی (اختیاری)

مراقبت و نگهداری

سمک

خشک کردن

نگهداری حرفه‌ای

اطلاعات ایمنی مهم

اطلاعات دیگر

اطلاعات ایمنی

لوازم جانبی

راه اندازی، حمل و نقل، و شرایط نگهداری

اطلاعات بازیافت

علائم استفاده شده

عیب‌یابی سمک‌ها

خوش آمدگویی

از انتخاب سمعک‌های ما برای همراهی در زندگی روزانه خود بسیار سپاسگزاریم. درست مثل هر چیز تازه‌ای، مدتی زمان می‌برد تا با آن آشنا شوید. این راهنما، حین حمایت‌هایی که از طرف متخصص شنوایی خود می‌شوید، به شما کمک می‌کند تا مزایا و کیفیت بالای زندگی که سمعک به شما هدیه می‌کند بیشتر دریابید.

برای بهره‌مندی بیشتر از سمعک‌های خود، پیشنهاد می‌شود که آنها را روزانه و در طول روز به طور مرتب استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا با آنها بیشتر عادت کنید.

احتیاط



مطالعه کامل این راهنما و دستورالعمل ایمنی بسیار مهم است. اطلاعات ایمنی را دنبال نمایید تا از آسیب و صدمه جلوگیری کنید.



قبل از استفاده از سمعک‌ها برای اولین بار، کاملاً آنها را شارژ نمایید. دستورالعمل‌های راهنمای استفاده از شارژر را دنبال کنید.

سمک شما



این راهنما ویژگی‌هایی را شرح می‌دهد که ممکن است سمک‌های شما آنها را داشته یا نداشته باشد.

از متخصص شنوایی خود بخواهید تا ویژگی‌های صحیح سمک‌های شما را نشان دهد.

نوع سمک

سمک شما از نوع پشت‌گوشی می‌باشد. یک شلنگ صدا را از سمک به داخل گوش هدایت می‌کند. وسیله مورد نظر برای کودکان زیر سه سال و افراد کم‌توان ذهنی مناسب نمی‌باشد.

باتری قابل شارژ لیتیوم یونی بصورت کامل داخل سمک تعبیه شده است که می‌شود براحتی با شارژر مخصوص خود شارژ می‌شود. این کار با استفاده از شارژر استاندارد یا شارژر اختیاری با خشک‌کن انجام می‌شود.

عملکرد بی‌سیم باعث ایجاد ویژگی‌های شنوایی پیشرفته و همزمانی بین دو سمک می‌شود.

سمک‌های شما مجهز به تکنولوژی بلوتوث کم‌مصرف* می‌باشد که می‌تواند باعث تبادل راحت اطلاعات با گوشی هوشمند و ارتباط صوتی مستقیم با گوشی آیفون شما شود.**

* عبارت و علامت بلوتوث متعلق به شرکت سیگنیا می‌باشد و تمام علامت‌های مانند آن دارای مجوز حقوقی و قانونی می‌باشد. علامت‌ها و نام‌های تجاری دیگر متعلق به شرکت‌های مربوطه دیگر می‌باشد.

** آیفون، آپید و آپید نام‌های تجاری شرکت اپل می‌باشند که در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها به ثبت رسیده است.

آشنایی با سمعک


توصیه می‌شود تا خود را با سمعک‌های جدید آشنا کنید. همراه با سمعک‌هایی که در دست خود دارید سعی بر استفاده از کنترل‌ها و شناخت محل قرارگیری آنها روی سمعک نمائید. این به شما کمک می‌کند تا سریع‌تر دکمه‌های روی سمعک را با دستانتان لمس کنید و در هنگام قرارگیری سمعک بر روی گوش از آنها استفاده نمائید.

سمعک‌های شما می‌توانند به یک قلاب (هوک) و یک قالب مخصوص و یا یک تیوب باریک (تین تیوب) و یک قطعه گوش (تیپ) متصل شود.



اجزا و نام آنها

سمعک شما به یک قلاب (هوک) و یک قالب مخصوص وصل شده است.

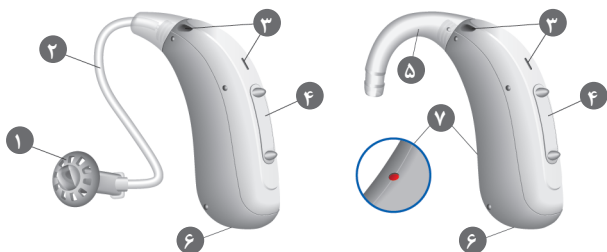

- | | | | |
|---|---|---|--------------------|
| ۱ | قطعه گوش | ۵ | هوک |
| ۲ | شلنگ باریک (تین تیوب) | ۶ | محل اتصال به شارژر |
| ۳ | ورودی های میکروفن | ۷ | نشانگر رنگی |
| ۴ | دکمه الکلنگی (کنترل ها،
دکمه خاموش / روشن) | | |

شما می توانید سمعک را به همراه یک قالب مخصوص با شلنگ و یا با قطعه گوش و تیوب باریک استفاده نمایید.

شما می توانید به راحتی قطعه گوش را جدا کرده و شلنگ آن را تمیز کنید. مطالعه بیشتر در قسمت "مراقبت و نگهداری"

قالب‌های مخصوص گوش

سایز

Standard ear pieces

Instant Open



Instant Tulip



ThinTube



قالب‌های مخصوص گوش

مثال: ☐



کنترل‌ها

با استفاده از دکمه الکلنگی روی سمک شما می‌توانید برای مثال ولوم صدای سمک را تنظیم و یا برنامه شنیداری را خود را تغییر دهید. متخصص شنوایی شما عملکرد دلخواه شما را برای دکمه الکلنگی تنظیم می‌کند.

عملکرد دکمه الکلنگی		R	L
فشار کوتاه:			
تغییر برنامه شنیداری بالا/پایین	☐	☐	
ولوم صدا بالا/پایین	☐	☐	
شدت سیگنال درمان وزوز بالا/پایین	☐	☐	
ارتباط با تلویزیون روشن / خاموش	☐	☐	
فشار حدوداً ۲ ثانیه‌ای:			
تغییر برنامه شنیداری بالا/پایین	☐	☐	
ولوم صدا بالا/پایین	☐	☐	
شدت سیگنال درمان وزوز بالا/پایین	☐	☐	
ارتباط با تلویزیون روشن / خاموش	☐	☐	
فشار بیش از ۳ ثانیه:			
خاموش / روشن شدن	☐	☐	
چپ=L ، راست=R			

شما همچنین می‌توانید از یک ریموت کنترل برای تغییر برنامه شنیداری و یا ولوم صدای سمک خود استفاده کنید. و یا با استفاده از نصب اپلیکیشن ما بر روی گوشی هوشمند خود با امکانات و کنترل‌های بیشتر این کار را انجام دهید.



برنامه های شنیداری

۱
۲
۳
۴
۵
۶

مطالعه بیشتر در قسمت "تغییر برنامه شنیداری"

ویژگی ها

ویژگی درمان وزوز گوش تولید صدا می کند تا حواس شما از وزوز گوشستان پرت شود. ○

استفاده روزانه

جهت اطمینان از استفاده راحت از سمک‌های خود عناصری روی سمک تعبیه شده است. به علاوه ما استفاده از اپلیکیشن برای اندروید و آیفون را جهت کنترل سمک توصیه می‌کنیم. جهت دانلود و نصب اپلیکیشن با متخصص شنوایی خود تماس بگیرید.

شارژ کردن

شما دو انتخاب برای شارژ دارید: شارژ استاندارد فقط برای شارژ یا شارژ خشک کن دار.



◀ سمک‌های خود را داخل

شارژر قرار دهید.

دستورالعمل شارژر را در

راهنمای کاربر دنبال‌نمائید.

به علاوه شما اطلاعات

مفیدی در این قسمت

دریافت خواهید کرد.

شناسایی شارژ کم

هنگام اتمام شارژ صدای بوقی را می شنوید. این بوق هر ۲۰ دقیقه یک بار تکرار می شود. بستگی به استفاده شما از سمک ممکن است تا یک ساعت و نیم دیگر سمک کار کند و سپس خاموش شود. توجه کنید تا مدت زمان استفاده از شارژ دز صورت استفاده از چندین عملکرد همزمان کاهش می یابد.

خاموش و روشن کردن

شما جهت خاموش و یا روشن کردن سمک موارد زیر را می توانید انجام دهید.

با استفاده از شارژر:

- ◀ روشن کردن: سمک را از شارژر بیرون بیارید.
- ◀ آهنگ خوش آمدگویی پخش می شود. ولوم و برنامه پیش فرض اجرا می شود.
- خاموش کردن: سمک را داخل شارژر قرار دهید.

توجه کنید شارژر باید به برق وصل باشد. برای جزئیات بیشتر به راهنمای شارژر مراجعه نمائید.

با استفاده از دکمه الکلنگی:



◀ روشن شدن: دکمه پایینی را فشار داده و نگه دارید تا صدای ملودی خوش آمدگویی شنیده شود. هنگام شنیدن ملودی دکمه را رها کنید.

ولوم و برنامه شنیداری پیش فرض اجرا می شود.



◀ خاموش کردن: دکمه پایین یا بالا را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا سمعک خاموش شود. ملودی خاموش شدن شنیده خواهد شد.

همچنین نکات شارژ شدن را در قسمت راهنمای کاربر ملاحظه نمایید.

انتخاب حالت آماده بکار

با استفاده از ریموت کنترل یا اپلیکیشن شما می‌توانید سمعک‌ها را در حالت آماده بکار قرار دهید. با این کار سمعک‌ها بی صدا می‌شوند. وقتی از حالت آماده به کار خارج می‌شود برنامه و ولوم قبلی اجرا می‌شود.

توجه:

- در حالت آماده بکار، سمعک کاملاً خاموش نمی‌شود و از جریان باتری همچنان استفاده می‌کند.
بنابراین پیشنهاد می‌شود حالت آماده بکار فقط در مدت زمان کوتاهی استفاده شود.
- اگر می‌خواهید از حالت آماده بکار خارج شوید، ولی ریموت کنترل و یا اپلیکیشن در دسترس شما نیست؛ سمعک را خاموش و روشن کنید (با استفاده از دکمه‌های الکلنگی روی آن یا قراردادن سمعک در شارژر تا چراغ یا چراغ‌های روی شارژر روشن شود). در این حالت، ولوم و برنامه پیش فرض اجرا می‌شود.


قراردادن و برداشتن سمعک

سمعک‌های شما بصورت مجزا برای گوش راست و چپ تنظیم می‌شود. نشانگر رنگی گوش مورد نظر را مشخص می‌کند:



- نشانگر قرمز = گوش راست
- نشانگر آبی = گوش چپ

قراردادن سمعک روی گوش:

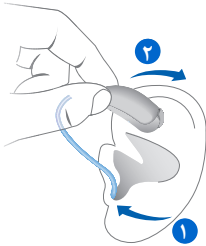

◀ شلنگ قالب را از سمت قالب در دست بگیرید.

◀ با دقت قالب را در گوش قرار دهید. ❶

◀ به نرمی آن را فشار داده تا در جایش

به خوبی قرار گیرد.

دهان خود را باز و بسته کنید تا هوا

داخل مجرای گوش محبوس نشود.

◀ سمعک را بالا برده و در بالای پشت

لاله گوش قرار دهید. ❷


هشدار



خطر آسیب رساندن!

◀ قطعه گوش را با احتیاط قرار داده و بیش از حد در عمق کانال گوش قرار ندهید.

- استفاده از دست راست برای قرار دادن سمعک راست و استفاده از دست چپ برای قرار دادن سمعک چپ می تواند مفید باشد.
- اگر شما در قراردادن قطعه گوش مشکل دارید، می توانید با استفاده از دست دیگر لاله گوش را به سمت عقب بکشید. این کار باعث می شود مجرا گوش باز شده و قطعه گوش را به راحتی داخل مجرا قرار دهید.

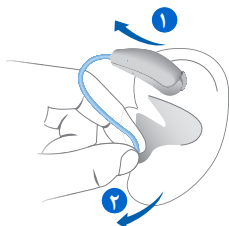

برداشتن سمعک از روی گوش:

- ◀ سمعک را از پشت گوش در آورید. ۱
- ◀ قالب را از سمت شلنگ گرفته و با دقت از گوش خارج کنید. ۲

سمعک را پس از هر بار استفاده خشک و تمیز کنید. قسمت "مراقبت و نگهداری" را مطالعه کنید.

تنظیم ولوم صدا

سمعک شما بصورت خودکار در موقعیت های شنیداری ولوم صدا را تغییر و تطبیق می دهد.

◀ اگر شما ترجیح می دهید تا بصورت دستی ولوم صدا را تغییر دهید از دکمه الاکلنگی روی سمعک استفاده نمایید.

مراجعه به بخش "کنترل ها" برای تنظیم دکمه الاکلنگی

تغییرات ولوم می‌تواند همراه با شنیدن یک صدای بوق باشد. همچنین لحظه‌ای که سطح ولوم صدا به حالت حداکثر و یا حداقل می‌رسد شما می‌توانید صدای بوق دیگری را بشنوید.

تغییر برنامه شنیداری

بسته به موقعیت شنیداری که شما در آن قرار دارید سمعک بصورت خودکار صدا را تنظیم می‌کند.

همچنین سمعک شما ممکن است دارای چندین برنامه شنیداری دستی باشد که در صورت نیاز شما می‌توانید آنها را انتخاب کنید تا صداها تغییر کند. صدای بوق مخصوصی شما را از تغییرات برنامه آگاه می‌کند.

◀ برای تغییر برنامه شنیداری دکمه الاکلنگی را فشار دهید.

به قسمت "کنترل‌ها" جهت تنظیمات دکمه الاکلنگی مراجعه نمایید. به قسمت "برنامه های شنیداری" برای لیست برنامه‌های شنیداری مراجعه نمایید. ولوم پیش فرض اعمال می‌شود.


تنظیمات دیگر (اختیاری)

شما می‌توانید از دکمه‌های سمعک برای موارد دیگر نیز مانند تنظیم شدت درمان وزوز گوش استفاده نمایید.

برای تنظیمات دکمه‌های کنترل سمعک به قسمت "کنترل‌ها" مراجعه نمایید.

موقعیت‌های خاص شنیداری

در حالت تلفن

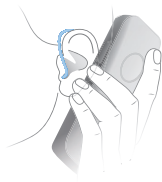

هنگام استفاده از تلفن، بلندگوی تلفن را اندکی بالای گوش بگیرید. تا جایی که بلندگوی تلفن در راستای میکروفن سمعک قرار بگیرد. بلندگوی تلفن را کمی بچرخانید و جوری بگیرید تا کاملاً تلفن روی گوش را نپوشاند.

برنامه تلفن

اگر شما ترجیح می‌دهید تا صدای تلفن را هنگام استفاده از آن بلندتر بشنوید از متخصص شنوایی خود بخواهید تا برای شما برنامه مجرا برای تلفن قرار دهد.

◀ هنگام استفاده از تلفن، سمعک را روی برنامه تلفن قرار دهید.

اگر برنامه تلفن برای سمعک شما تعبیه شده است در قسمت "برنامه‌های شنیداری" لیست شده است.

ارتباط مستقیم صوتی با گوشی آیفون

سمعک شما وسایل شنوایی می‌باشد که برای آیفون ساخته شده است. این یعنی شما می‌توانید تماس‌های تلفنی و موسیقی را بصورت مستقیم در سمعک‌تان بشنوید. جهت اطلاعات بیشتر درباره جفت کردن سمعک با گوشی، نسخه وسایل iOS سازگار با سمعک و ارتباط صوتی مستقیم و عملکردهای مفید دیگر با متخصص شنوایی خود تماس بگیرید.

حالت هواپیما

در مناطقی که استفاده از تکنولوژی بلوتوث ممنوع است (مانند برخی هواپیماها) شما می‌توانید سمعک را در حالت هواپیما قرار دهید. در این حالت بلوتوث در سمعک شما موقتاً غیرفعال می‌شود. سمعک همچنان کار می‌کند بدون بلوتوث ولی ارتباط بلوتوثی و صوتی مستقیم و دیگر عملکردها از دسترس خارج می‌شود.

◀ جهت فعالسازی یا غیر فعالسازی حالت هواپیما می‌توانید از دکمه روی سمعک استفاده کنید.

یک صدای بوق شما را از فعال بودن یا نبودن این حالت آگاه می‌کند.

لوپ‌های القایی صوتی (اختیاری)

برخی از تلفن‌ها و مکان‌های عمومی مانند سالن‌های تئاتر صدای گفتار و موسیقی را از طریق سیستم لوپ القایی ارائه می‌دهد. با این سیستم سمعک‌های شما صدای دلخواه و خالص را بدون نویزهای اضافی محیطی به گوش‌های شما می‌رساند.



شما می‌توانید سیستم‌های لوپ‌القایی صوتی را با علامت مشخص شده شناسایی کنید.

هر وقت شما در محیطی که مجهز به سیستم صوتی لوپ القایی قرار دارید:

◀ برنامه سمک را روی تل کویل قرار دهید.

اگر برنامه تل کویل برای شما تعیبه شده است در قسمت "برنامه های شنیداری" لیست آن قرار دارد.

برنامه تل کویل و ریموت کنترل

توجه



برای سمک های مجهز به ارتباط وایرلس:

وقتی تل کویل فعال می شود، ممکن است ریموت کنترل نویز ایجاد کند.

از ریموت کنترل در فاصله بیشتر از ۱۰ cm (۴ inch) استفاده کنید.

مراقبت و نگهداری

برای پیشگیری از آسیب دیدن سمعک شما باید از سمعک‌های خود مراقبت کرده و یک سری قاعده ساده را رعایت کنید و یک بخش از روال کار روزانه خود قرار دهید.

سمعک

تمیز کردن

بدنه سمعک شما پوشش محافظتی دارد، ولی به هر حال اگر مرتب تمیز نکنید ممکن است آسیب ببیند و یا باعث صدمه شخصی به آن شود.

◀ سمعک خود را روزانه با یک دستمال نرم و خشک تمیز کنید.



◀ هرگز سمعک را زیر شیر آب یا داخل آب قرار ندهید.

◀ هرگز موقع نظافت سمعک به آن فشار وارد نکنید.

◀ هرگز مشتقات الکلی را به محل اتصال شارژر نزنید.

برای جلوگیری از زنگ زدگی یا خوردگی محل اتصال شارژر را با یک دستمال نرم و خشک برای رفع رطوبت خشک و پاک کنید.

◀ از متخصص شنوائی خود بخواهید تا توصیه‌های بهداشتی، مراقبتی، شرایط نگهداری و نظافت سمعک در بهترین حالت را به شما توضیح دهد.

خشک کردن

از محصولات مرسوم جهت خشک کردن سمعک ها استفاده نمائید. از متخصص شنوایی خود سوال کنید تا محصولات توصیه شده برای خشک کردن و دستوالعمل های مخصوص برای خشک کردن سمعک را به شما توضیح دهد.

نگهداری

- نگهداری کوتاه مدت (برای چند روز): سمعک ها را با دکمه الاکلنگی خاموش کرده یا آنها را داخل شارژر قرار دهید. شارژر باید به برق وصل باشد. اگر شارژر به برق متصل نباشد و سمعک ها را داخل آن قرار دهید، سمعک ها خاموش نخواهند شد. توجه کنید اگر سمعک را با ریموت کنترل یا اپلیکیشن خاموش می کنید، سمعک کاملاً خاموش نمی شود و از جریان باتری همچنان در حالت آماده بکار استفاده می شود.
- نگهداری طولانی مدت (هفته ها، ماه ها، ...): اول، سمعک ها را کاملاً شارژ کنید. سپس با دکمه الاکلنگی آنها را خاموش کنید. ما توصیه می کنیم برای نگهداری در این مدت از محصولات خشک کن استفاده کنید. در فاصله زمانی ۶ ماهه باید سمعک ها را مجدد شارژ کنید تا از باتری آنها از کار نیافتند. باتری کامل تخلیه شده، شارژ نمی شود و باید تعویض شود.


توصیه می‌کنیم در فواصل شش ماهه مکرراً شارژ کنید.
عملکرد ها را در قسمت " راه اندازی، جابجایی و شرایط نگهداری " ملاحظه نمائید.

شلنگ و قالب گوش

جرم ممکن است روی قطعات گوش را بگیرد. که ممکن است روی کیفیت صدا تاثیر بگذارد.

- برای سمعک ها همراه با تیوب استاندارد (تین تیوب):
روزانه قطعه گوش را تمیز کنید، در صورت نیاز تیوب را هم تمیز کنید.
تیوب و قطعه گوش را حدودا هر سه یا شش ماه یکبار انجام دهید. یا در صورت خرابی یا تغییرات دیگر می‌توانید زودتر انجام دهید.
- برای سمعک های با هوک:
قطعه یا قالب گوش را روزانه تمیز کنید.
از متخصص شنوائی خود در مورد تمیز کردن و یا تعویض قطعات گوش و تیوب در صورت نیاز سوال کنید.


تمیز کردن قطعه گوش

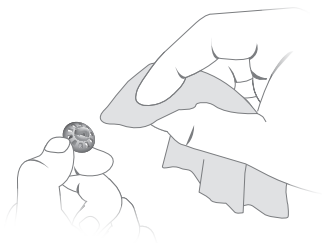

◀ قسمت بالای قطعه گوش را با دستمال خشک و نرم تمیز کنید. این کار باعث می شود جرم خشک و سفت نشود.

◀ قالب را داخل آب فرو نبرید و یا زیر شیر آب نگیرید.

شارژر خشک کن اختیاری از لامپ UV جهت خشک کردن و تمیز کردن شلنگ و قالب همزمان با شارژ کردن استفاده می کند. از متخصص شنوائی خود جهت استفاده از بهترین راه کار سوال کنید.

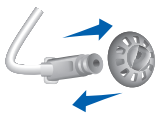

تعویض قطعه گوش

◀ قطعه گوش قبلی را بکشید و قطعه جدید را جا بزنید.

تعویض تیوب

◀ تیوب مصرف شده را از سمعک باز کنید.



◀ تیوب جدید را بچرخانید تا بسته شود.



نگهداری حرفه ای

متخصص شنوائی شما نگهداری و مراقبت های کامل و حرفه ای را می تواند انجام دهد. از متخصص شنوائی خود بخواهید تا توصیه های اختصاصی برای نگهداری و سرویس های دوره ای را به شما اطلاع دهد.

اطلاعات ایمنی مهم

این قسمت شامل اطلاعات مهم ایمنی راجع به باتری سمک می باشد. برای اطلاعات بیشتر به دستورالعمل ایمنی همراه سمک مراجعه نمائید.

هشدار



باتری قابل شارژ لیتیوم یونی داخل وسیله شما تعبیه شده است. استفاده ناصحیح از وسیله می تواند باعث انفجار باتری شود.
خطر آسیب دیدن، آتش یا انفجار!
◀ به قسمت دستورالعمل های باتری قابل شارژ لیتیوم یونی مراجعه کنید.

هشدار



خطر شوک الکتریکی!
◀ شارژر را فقط با کابل مخصوص شارژ با استانداردهای IEC 60950-1 یا IEC 62368-1 استفاده کنید.



هشدار

- ◀ شرایط راه اندازی را ملاحظه نمائید.
- ◀ توجه کنید وسیله را از گرمای شدید دور کنید (مثل آتش، مایکروویو، اجاق گاز یا سطوح بسیار گرم) و نور مستقیم خورشید.
- ◀ سمک ها را با شارژر مخصوص شارژ کنید. از متخصص شنوائی خود راهنمایی بگیرید.
- ◀ قطعات وسیله را خودتان از هم جدا نکنید.
- ◀ وسیله را در مکان های قابل انفجار استفاده نکنید.
- ◀ وسیله ای که تغییر شکل یافته یا خراب شده و یا آسیب دیده است را استفاده نکنید.
- ◀ اگر پس از شارژ، عملکرد سمک به طور قابل توجهی کاهش یافت آن را به متخصص شنوائی خود برگردانید.
- ◀ وسیله را در آتش یا آب نیاندازید.



هشدار

- ◀ تعویض و تعمیرات باید توسط متخصص شنوائی انجام شود. پس:
- ◀ خودتان سعی در تعمیر یا تعویض باتری نکنید.
- ◀ در موارد ناخواسته انفجار یا سوختن باتری لیتیوم یونی، تمام مواد قابل احتراق را کنار بگذارید.

در هر کدام از موارد فوق، وسایل را به متخصص شنوائی خود برگردانید.

اطلاعات بیشتر

اطلاعات ایمنی

برای اطلاعات ایمنی، به دستورالعمل ایمنی ارائه شده به همراه سمعک مراجعه نمایید.

لوازم جانبی

شما می توانید از یک اپلیکیشن در گوشی موبایل خود جهت ریموت کنترل کردن سمعک استفاده نمایید. همچنین اپلیکیشن به شما اجازه می دهد تا صدا را غیرفعال کنید یا حالت های شخصی و برنامه های شنیداری خود را تغییر دهید و بسیاری عملکرد دیگری از سمعک را در دستانتان بگیرید.

راه اندازی، حمل و نقل و شرایط نگهداری سمعک ها و شارژر

شرایط نگهداری		Charging	Discharging
دما		10 to 35 °C (50 to 95 °F)	0 to 50 °C (32 to 122 °F)
		20 to 75 %	5 to 93 %
رطوبت مطلوب		700 to 1060 hPa	700 to 1060 hPa
فشار اتمسفر		hPa	

در مدت حمل و نقل و نگهداری طولانی مدت شرایط زیر را ملاحظه کنید:

Transport	Storage	
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)	10 to 25 °C (50 to 77 °F)	دما (توصیه شده)
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)	10 to 40 °C (50 to 104 °F)	دما (حداکثر)
5 to 90 %	20 to 80 %	رطوبت (توصیه شده)
5 to 90 %	10 to 80 %	رطوبت (حداکثر)
700 to 1060 hPa	700 to 1060 hPa	فشار اتمسفر

توجه کنید سمک ها را حداقل هر شش ماه یکبار شارژ کنید. ما توصیه می کنیم این کار را هر سه ماه انجام دهید. برای جزئیات بیشتر به قسمت "نگهداری و مراقبت" مراجعه کنید.

هشدار



خطر آسیب دیدن، آتش گرفتن یا انفجار حین حمل و نقل.
 ◀ شارژر، باتری و سمک ها را مطابق قوانین محلی جابجا کنید.

اطلاعات بازیافت

- ◀ برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست، باتری و سمک و شارژر را داخل سطل آشغال نیندازید.
- ◀ شارژر، باتری و سمک ها را مطابق قوانین محلی امحا یا دفع کنید.

علائم استفاده شده در این راهنما

 اشاره به موقعیت هایی که می تواند باعث آسیب شدید، متوسط و یا اندک شود.

 نشان دهنده احتمال آسیب رساندن

 توصیه و نکات رسیدگی بهتر به وسیله.

آیپد یا آیپود ارائه شده توسط اپل استانداردهای عملکردی مورد تایید اپل را پیروی می کنند. اپل

Made for
 iPhone | iPad | iPod

مسئولیت راه اندازی و سازگاری با استانداردهای امنیتی و قانونی این وسیله را ندارد. لطفا توجه نمائید که استفاده از این وسیله جانبی می تواند عملکرد وایرلس را تحت تاثیر قرار دهد.

عیب یابی سمعک ها

مشکلات و راه حل های احتمالی

صدا ضعیف است.

- ولوم را زیاد کنید.
- باتری ضعیف را تعویض کنید.
- قطعه گوش را تمیز یا تعویض کنید.

سمعک سوت می زند.

- مجدداً قطعه گوش را با اطمینان و محکم داخل گوش قرار دهید.
- ولوم صدا را کم کنید.
- قطعه گوش را تمیز یا تعویض کنید.

صدا خش دار است.

- ولوم صدا را کم کنید.
- باتری ضعیف را تعویض کنید.
- قطعه گوش را تمیز یا تعویض کنید.

سمعک صدای بوق یا ملودی می دهد.

- سمعک را شارژ کنید.

سمعک کار نمی کند.

- سمعک را روشن کنید.
 - سمعک را شارژ کنید. همچنین چراغ روی شارژر را نگاه کنید.
-

اگر با مشکلات دیگری مواجه شدید با متخصص شنوایی خود مشورت کنید.



Legal Manufacturer

WSAUD A/S

Nymoellevej 6

3540 Lyngø

Denmark

Document No. 04230-99T01-7600 EN

Order/Item No. 109 908 23

Master Rev01, 10.2020

© 12.2020, WSAUD A/S. All rights reserved



www.signia.net