



Pure 312 X

دفترچه راهنما



Made for

Apple iPhone | iPad | iPod

دفترچه راهنما

خوش آمدگویی

سمعک شما

سمعک شما
نوع سمعک
آشنایی با سمعک
اجزا و نام آنها
کنترل‌ها
برنامه‌های شنیداری
ویژگی‌ها

باتری‌ها

اندازه باتری و نکات استفاده از آن
تعویض باتری

استفاده روزانه

خاموش / روشن کردن
قرار دادن و برداشتن سمعک
تنظیم ولوم صدا
تغییر برنامه شنیداری
تنظیمات دیگر (اختیاری)

موقعیت‌های خاص شنیداری

در حالت تلفن

ارتباط مستقیم صوتی با گوشی آیفون

حالت پرواز

لوپ صوتی القایی (اختیاری)

مراقبت و نگهداری

سمک

قطعات سمک

نگهداری حرفه‌ای

اطلاعات بیشتر

اطلاعات ایمنی

لوازم جانبی

علائم استفاده شده

عیب‌یابی سمک‌ها

خوش آمدگویی

از انتخاب سمعک‌های ما برای همراهی در زندگی روزانه خود بسیار سپاسگزاریم. درست مثل هر چیز تازه‌ای، مدتی زمان می‌برد تا با آن آشنا شوید. این راهنما، حین حمایت‌هایی که از طرف متخصص شنوایی خود می‌شوید، به شما کمک می‌کند تا مزایا و کیفیت بالای زندگی که سمعک به شما هدیه می‌کند بیشتر دریابید.

برای بهره‌مندی بیشتر از سمعک‌های خود، پیشنهاد می‌شود که آنها را روزانه و در طول روز به طور مرتب استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا با آنها بیشتر عادت کنید.

احتیاط



مطالعه کامل این راهنما و دستورالعمل ایمنی بسیار مهم است. اطلاعات ایمنی را دنبال نمایید تا از آسیب و صدمه جلوگیری کنید.

سمک شما



این راهنما ویژگی‌هایی را شرح می‌دهد که ممکن است سمک‌های شما آنها را داشته یا نداشته باشد.
از متخصص شنوایی خود بخواهید تا ویژگی‌های صحیح سمک‌های شما را نشان دهد.

نوع سمک

سمک‌های شما از نوع RIC (رسیور داخل مجرا) می‌باشد. رسیور (بلندگو) داخل مجرای گوش قرار می‌گیرد و با یک سیم به سمک وصل می‌شود. این نوع سمک برای کودکان زیر ۳ سال و افرادی که سن رشدشان زیر ۳ سال است مناسب نمی‌باشد. عملکرد بی‌سیم باعث ایجاد ویژگی‌های شنوایی پیشرفته و همزمانی بین دو سمک می‌شود.

سمک‌های شما مجهز به تکنولوژی بلوتوث کم‌مصرف* می‌باشد که می‌تواند باعث تبادل راحت اطلاعات با گوشی هوشمند و ارتباط صوتی مستقیم با گوشی آیفون شما شود.**

* عبارت و علامت بلوتوث متعلق به شرکت سیگنیا می‌باشد و تمام علامت‌های مانند آن دارای مجوز حقوقی و قانونی می‌باشد. علامت‌ها و نام‌های تجاری دیگر متعلق به شرکت‌های مربوطه دیگر می‌باشد.
** آیفون، آپید و آپپود نام‌های تجاری شرکت اپل می‌باشند که در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها به ثبت رسیده است.

آشنایی با سمعک


توصیه می‌شود تا خود را با سمعک‌های جدید آشنا کنید. همراه با سمعک‌هایی که در دست خود دارید سعی بر استفاده از کنترل‌ها و شناخت محل قرارگیری آنها روی سمعک نمائید. این به شما کمک می‌کند تا سریع‌تر دکمه‌های روی سمعک را با دستانتان لمس کنید و در هنگام قرارگیری سمعک بر روی گوش از آنها استفاده نمائید.

اگر شما در استفاده از دکمه‌های روی سمعک مشکل دارید می‌توانید از یک ریموت کنترل برای این منظور استفاده کنید و یا با استفاده از نصب اپلیکیشن بر روی گوشی هوشمند خود با امکانات و کنترل‌های بیشتر این کار را انجام دهید.

i

اجزا و نام آنها

این راهنما چندین مدل سمعک را شرح می دهد. از تصاویر زیر جهت شناسایی نوع سمعک خود استفاده نمایید.

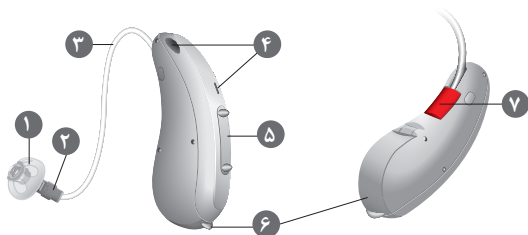

۱	قسمت داخل گوش	۶	محفظه باتری (سوئیچ خاموش / روشن) رسیور
۲	رسیور	۷	نشانگر جانبی و محل اتصال سیم رسیور به سمعک
۳	سیم رسیور		(قرمز = گوش راست - آبی = گوش چپ)
۴	ورودی های میکروفن		
۵	دکمه فشاری		

شما می توانید از قطعات استاندارد گوش زیر استفاده کنید:

سایز	Standard ear pieces		
	Click Sleeve (vented or closed)		☐
	Click Dome™ single (open or closed)		☐
	Click Dome semi-open		☐
	Click Dome double		☐

شما می توانید به راحتی قطعات استاندارد گوش را تعویض نمایید. برای مطالعه بیشتر به قسمت "مراقبت و نگهداری" مراجعه کنید.

Custom-made ear pieces			
	Custom shell		☐
	Click Mold™		☐

کنترل‌ها



با استفاده از دکمه الکلنگی روی سمک شما می‌توانید برای مثال ولوم صدای سمک را تنظیم و یا برنامه شنیداری را خود را تغییر دهید. متخصص شنوایی شما عملکرد دلخواه شما را برای دکمه الکلنگی تنظیم می‌کند.

عملکرد دکمه الکلنگی

R L

فشار کوتاه:

☐	☐	تغییر برنامه شنیداری بالا/پایین
☐	☐	ولوم صدا بالا/پایین
☐	☐	شدت سیگنال درمان وزوز بالا/پایین
☐	☐	ارتباط با تلویزیون روشن / خاموش
فشار حدوداً ۲ ثانیه‌ای:		

☐	☐	تغییر برنامه شنیداری بالا/پایین
☐	☐	ولوم صدا بالا/پایین
☐	☐	شدت سیگنال درمان وزوز بالا/پایین
☐	☐	ارتباط با تلویزیون روشن / خاموش

فشار بیش از ۳ ثانیه:

☐	☐	خاموش / روشن شدن
☐	☐	فعالسازی / غیرفعالسازی حالت هواپیما

چپ=L ، راست=R

شما همچنین می‌توانید از یک ریموت کنترل برای تغییر برنامه شنیداری و یا ولوم صدای سمعک خود استفاده کنید و یا با استفاده از نصب اپلیکیشن ما بر روی گوشی هوشمند خود با امکانات و کنترل‌های بیشتر این کار را انجام دهید.

برنامه‌های شنیداری

۱
۲
۳
۴

مطالعه بیشتر در قسمت "تغییر برنامه شنیداری"

ویژگی‌ها

○ زمان تاخیر روشن شدن باعث حذف سوت هنگام قرار دادن سمعک در گوش می‌شود.

مطالعه بیشتر در قسمت "روشن/خاموش کردن"

○ ویژگی درمان وزوز گوش تولید صدا می‌کند تا حواس شما از وزوز گوش‌تان پرت شود.

○ یک تل‌کوئل در محفظه باتری تعبیه شده است تا سمعک را به سیستم‌های لوپ القایی صوتی ارتباط دهد.

مطالعه بیشتر در قسمت "لوپ‌های القایی صوتی"

باتری‌ها

وقتی باتری در حال اتمام است صدای سمعک کم شده و شما صدای بوق هشدار را در گوش‌تان می‌شنوید. نوع باتری مدت زمان تعویض آن را مشخص می‌کند.

اندازه باتری و نکات استفاده از آن

از متخصص شنوائی خود جهت معرفی باتری‌های سوال کنید.

سایز باتری	۳۱۲
------------	-----

- همواره از سایز باتری صحیح برای سمعک‌های خود استفاده نمائید.
- اگر قصد دارید چندین روز از سمعک‌های خود استفاده نکنید باتری را از سمعک خارج کنید.
- همیشه باتری یدک به همراه خود داشته باشد.
- باتری‌های خالی را فوراً از سمعک خارج نموده و طبق قوانین بازیافت محلی خود باتری‌های مصرف شده را امحاء نمائید.

تعویض باتری

خارج کردن باتری:

◀ در محفظه باتری را باز کنید.



◀ با استفاده از چوب آهنربایی باتری را از آن خارج کنید. چوب آهنربایی در لوازم جانبی در دسترس می باشد.



قرار دادن باتری:

◀ اگر باتری برچسب محافظ دارد قبل از استفاده آن را از روی باتری جدا کنید.



◀ باتری را در حالتی که قطب + آن رو به بالا باشد داخل در باتری قرار دهید. (مانند تصویر)



◀ با احتیاط در باتری را ببندید. اگر احساس می کنید به سختی بسته می شود یعنی باتری به درستی داخل محفظه خود قرار نگرفته است. به هیچ وجه تلاش نکنید تا در باتری را با زور و فشار ببندید زیرا این کار می تواند به سمعک آسیب برساند.

استفاده روزانه

خاموش یا روشن کردن

شما می‌توانید با استفاده از روش‌های زیر سمعک خود را خاموش یا روشن نمایید.

از طریق محفظه باتری:

- ◀ روشن کردن: در باتری را ببندید.
- ◀ ولوم و برنامه شنیداری پیش فرض فعال می‌شود.
- ◀ خاموش کردن: در باتری را بصورت نیمه باز کنید.

با استفاده از دکمه روی سمعک:

- ◀ خاموش یا روشن کردن: دکمه را فشار داده و چندین ثانیه نگه دارید. برای تنظیمات دکمه الاکلنگی به بخش "کنترل‌ها" مراجعه نمایید.
- در این حالت پس از روشن شدن، ولوم و برنامه شنیداری قبلی فعال می‌شود.

هنگام قراردادن سمعک بر روی گوش، یک بوق هشدار نشان می‌دهد که سمعک روشن یا خاموش می‌شود.


وقتی زمان تاخیر روشن شدن فعال باشد، سمعک پس از طی زمان مورد نظر روشن می‌شود.

در این زمان شما فرصت دارید سمعک را بدون نگرانی از سوت زدن بر روی گوش قرار دهید.

زمان "تاخیر روشن شدن" را متخصص شنوایی شما می‌تواند فعالسازی نماید.

قرار دادن و برداشتن سمعک


سمعک های شما بصورت مجزا برای گوش راست و چپ تنظیم می شود. نشانگر رنگی گوش مورد نظر را مشخص می کند:

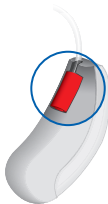


- نشانگر قرمز = گوش راست
- نشانگر آبی = گوش چپ

قرار دادن سمعک:

برای Click Sleeve ها، دقت کنید تا خم کلیک اسلیو در راستای خم سیم رسیور قرار گیرد.

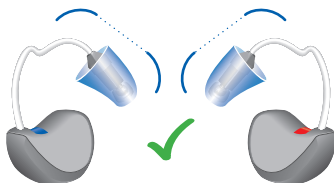


صحیح:

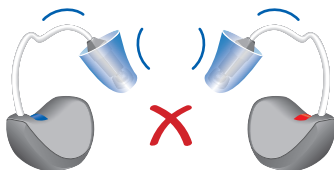

اشتباه:

◀ سیم رسیور را از قسمتی که با بخش داخل گوش متصل است بگیرید.

◀ با احتیاط قطعه گوش را داخل مجرا قرار دهید. ❶

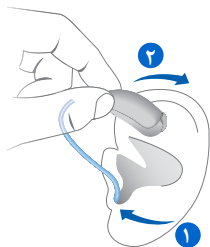

با ملایمت در گوش بچرخانید تا به

خوبی در مجرای گوش قرار گیرد.

◀ دهان خود را باز و بسته کنید تا از

گرفتگی هوا در مجرای گوش

جلوگیری نمائید.

◀ سمعک را بلند کنید و بالای گوش

قرار دهید. ❷

هشدار



خطر آسیب رساندن!

◀ قطعه گوش را با احتیاط قرار داده و بیش از حد در عمق کانال گوش قرار

ندهید.

• استفاده از دست راست برای قرار دادن سمعک راست و استفاده از دست

چپ برای قرار دادن سمعک چپ می تواند مفید باشد.


• اگر شما در قراردادن قطعه گوش مشکل دارید، می توانید با استفاده از

دست دیگر لاله گوش را به سمت عقب بکشید. این کار باعث می شود

مجرا گوش باز شده و قطعه گوش را به راحتی داخل مجرا قرار دهید.

i

رشته اضافی نگهدارنده کمک می‌کند تا قطعه گوش داخل مجرا با اطمینان قرار گیرد.

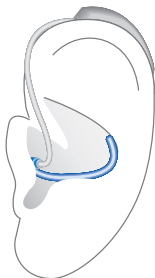

◀ رشته نگهدارنده را با دقت خم کنید بطوری که داخل صدفه گوش قرار گیرد. (مطابق تصویر)

برداشتن سمعک:

◀ سمعک را بلند کرده و از پشت گوش در آورید. ❶

◀ اگر سمعک شما همراه قالب

یا پوسته سفارشی می باشد،

با استفاده از پین مخصوص،


قالب را بیرون بکشید.

◀ برای دیگر قطعات گوش: رسیور

را با دو انگشت بگیرید و با احتیاط

از گوش بیرون بکشید. ❷

سیم رسیور را نکشید.

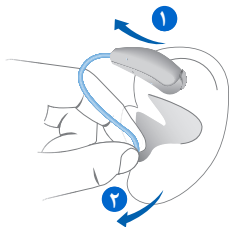

هشدار



خطر آسیب رساندن!

◀ در موارد بسیار نادر هنگام در آوردن سمعک ممکن است قطعه گوش در

مجرا بماند.

اگر این اتفاق افتاد، قطعه گوش باید توسط پزشک خارج شود.

پس از استفاده از سمعک آن را خشک و تمیز نمائید. مطالعه بیشتر در

قسمت "مراقبت و نگهداری"

تنظیم ولوم صدا

سمعک شما بصورت خودکار در موقعیت‌های شنیداری ولوم صدا را تغییر و تطبیق می‌دهد.

◀ اگر شما ترجیح می‌دهید تا بصورت دستی ولوم صدا را تغییر دهید از دکمه الکلنگی روی سمعک استفاده نمایید.

مراجعه به بخش "کنترل‌ها" برای تنظیم دکمه الکلنگی تغییرات ولوم می‌تواند همراه با شنیدن یک صدای بوق باشد. همچنین لحظه‌ای که سطح ولوم صدا به حالت حداکثر و یا حداقل می‌رسد شما می‌توانید صدای بوق دیگری را بشنوید.

تغییر برنامه شنیداری

بسته به موقعیت شنیداری که شما در آن قرار دارید سمعک بصورت خودکار صدا را تنظیم می‌کند.

همچنین سمعک شما ممکن است دارای چندین برنامه شنیداری دستی باشد که در صورت نیاز شما می‌توانید آنها را انتخاب کنید تا صداها تغییر کند. صدای بوق مخصوصی شما را از تغییرات برنامه آگاه می‌کند.


◀ برای تغییر برنامه شنیداری دکمه الکلنگی را فشار دهید.
به قسمت "کنترل‌ها" جهت تنظیمات دکمه الکلنگی مراجعه نمایید. به قسمت "برنامه‌های شنیداری" برای لیست برنامه‌های شنیداری مراجعه نمایید.
ولوم پیش فرض اعمال می‌شود.

تنظیمات دیگر (اختیاری)

شما می‌توانید از دکمه‌های سمعک برای موارد دیگر نیز مانند تنظیم شدت درمان وزوز گوش استفاده نمایید.
برای تنظیمات دکمه‌های کنترل سمعک به قسمت "کنترل‌ها" مراجعه نمایید.

موقعیت‌های خاص شنیداری

در حالت تلفن

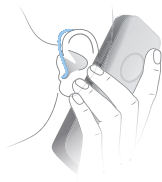

هنگام استفاده از تلفن، بلندگوی تلفن را اندکی بالای گوش بگیرید. تا جایی که بلندگوی تلفن در راستای میکروفن سمعک قرار بگیرد. بلندگوی تلفن را کمی بچرخانید و جوری بگیرید تا کاملاً تلفن روی گوش را نپوشاند.

برنامه تلفن

اگر شما ترجیح می‌دهید تا صدای تلفن را هنگام استفاده از آن بلندتر بشنوید از متخصص شنوایی خود بخواهید تا برای شما برنامه مجرا برای تلفن قرار دهد.

◀ هنگام استفاده از تلفن، سمعک را روی برنامه تلفن قرار دهید.

اگر برنامه تلفن برای سمعک شما تعبیه شده است در قسمت "برنامه‌های شنیداری" لیست شده است.

ارتباط مستقیم صوتی با گوشی آیفون

سمک شما وسایل شنوایی می باشد که برای آیفون ساخته شده است. این یعنی شما می توانید تماس های تلفنی و موسیقی را بصورت مستقیم در سمک تان بشنوید. جهت اطلاعات بیشتر درباره جفت کردن سمک با گوشی، نسخه وسایل iOS سازگار با سمک و ارتباط صوتی مستقیم و عملکردهای مفید دیگر با متخصص شنوایی خود تماس بگیرید.

حالت هواپیما

در مناطقی که استفاده از تکنولوژی بلوتوث ممنوع است (مانند برخی هواپیماها) شما می توانید سمک را در حالت هواپیما قرار دهید. در این حالت بلوتوث در سمک شما موقتاً غیرفعال می شود. سمک همچنان کار می کند بدون بلوتوث ولی ارتباط بلوتوثی و صوتی مستقیم و دیگر عملکردها از دسترس خارج می شود.

◀ جهت فعالسازی یا غیر فعالسازی حالت هواپیما می توانید از دکمه روی سمک استفاده کنید.

یک صدای بوق شما را از فعال بودن یا نبودن این حالت آگاه می کند.

لوپ های القایی صوتی (اختیاری)

برخی از تلفن ها و مکان های عمومی مانند سالن های تئاتر صدای گفتار و موسیقی را از طریق سیستم لوپ القایی ارائه می دهد. با این سیستم سمعک های شما صدای دلخواه و خالص را بدون نویز های اضافی محیطی به گوش های شما می رساند.



برخی از تلفن ها و مکان های عمومی مانند سالن های تئاتر صدای گفتار و موسیقی را از طریق سیستم لوپ القایی ارائه می دهد. با این سیستم سمعک های شما صدای دلخواه و خالص را بدون نویز های اضافی محیطی به گوش های شما می رساند.

اگر شما می خواهید از این سیستم استفاده نمایید، یک در باتری مخصوص نیاز دارید. به عنوان یک لوازم جانبی در برخی از مدل های سمعک موجود است. جهت اطلاعات بیشتر با متخصص شنوائی خود تماس بگیرید.

هر وقت شما در محیطی که مجهز به سیستم صوتی لوپ القایی قرار دارید:

◀ برنامه سمعک را روی تل کوئل قرار دهید.

اگر برنامه تل کوئل برای شما تعبیه شده است در قسمت "برنامه های شنیداری" لیست آن قرار دارد.

برنامه تل کوئل و ریموت کنترل

توجه



برای سمعک های مجهز به ارتباط وایرلس:

◀ وقتی تل کوئل فعال می شود، ممکن است ریموت کنترل نویز ایجاد کند.

از ریموت کنترل در فاصله بیشتر از ۱۰ cm (۴ inch) استفاده کنید.

مراقبت و نگهداری

برای پیشگیری از آسیب دیدن سمعک شما باید از سمعک‌های خود مراقبت کرده و یک سری قاعده ساده را رعایت کنید و یک بخش از روال کار روزانه خود قرار دهید.

سمعک

خشک کردن

- ◀ سمعک‌های خود را در شب خشک کنید.
- ◀ اگر مدت زیادی از سمعک استفاده نمی‌کنید باید در باتری را باز کنید و باتری را از آن خارج کرده و سمعک را در مکانی خشک قرار دهید.
- ◀ اطلاعات بیشتر را از متخصص شنوایی خود بخواهید.

تمیز کردن

بدنه سمعک شما پوشش محافظتی دارد، ولی به هر حال اگر مرتب تمیز نکنید ممکن است آسیب ببیند و یا باعث صدمه شخصی به آن شود.



- ◀ سمعک خود را روزانه با یک دستمال نرم و خشک تمیز کنید.
- ◀ هرگز سمعک را زیر شیر آب یا داخل آب قرار ندهید.
- ◀ هرگز موقع نظافت سمعک به آن فشار وارد نکنید.

◀ از متخصص شنوائی خود بخواهید تا توصیه‌های بهداشتی، مراقبتی، شرایط نگهداری و نظافت سمعک در بهترین حالت را به شما توضیح دهد.

قطعات سمعک

تمیز کردن

جرم گوش ممکن است روی قطعه گوش انباشته شود. این باعث می‌شود کیفیت صدا تحت تاثیر قرار بگیرد. قطعه گوش را روزانه تمیز کنید.

برای تمام انواع قطعات گوش:

◀ بعد از در آوردن سمعک از گوش،


قطعه گوش را با یک دستمال

نرم و خشک تمیز کنید.

این کار باعث جلوگیری از

خشک و سفت شدن جرم

گوش روی آن می‌شود.

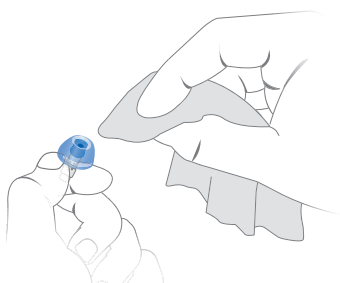

برای کلیک دم‌ها و کلیک اسلیوها:

◀ نوک آنها را فشار دهید.




تعویض

تقریباً هر سه ماه یکبار قطعه گوش را تعویض کنید. اگر ترک یا تغییری در آنها ملاحظه کردید زودتر تعویض کنید. روش تعویض قطعات گوش بسته به نوع آنها می‌تواند متفاوت باشد. در قسمت "اجزا و نام آنه" متخصص شنوایی شما نوع قطعه گوش شما را مشخص کرده است.

تعویض کلیک دم‌ها

◀ برای تعویض کلیک دم‌کهنه، از ابزاری مخصوص استفاده کنید یا مطابق دستورالعمل درج شده در پشت بسته بندی آن انجام دهید. مراقب باشید سیم رسیور را نکشید.

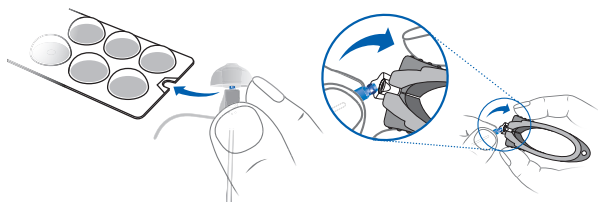

ابزار تعویض کلیک دم به عنوان لوازم جانبی موجود است.

◀ بسیار دقت کنید تا کلیک دم جدید

با صدای قابل توجه در جای خود قرار بگیرد.

◀ بررسی کنید تا کلیک دم جدید

محکم وصل شده باشد.



تعویض کلیک اسلیوها



- ◀ کلیک اسلیو را پشت و رو کنید.
- ◀ کلیک اسلیو و رسیور (نه سیم آن) را بین دو دست بگیرید و با انگشتان کلیک اسلیو را بیرون بکشید.
- ◀ بسیار دقت کنید تا کلیک اسلیو جدید محکم محکم سر جایش قرار گرفته است.

نگهداری حرفه ای

متخصص شنوائی شما نگهداری و مراقبت های کامل و حرفه ای را می تواند انجام دهد. قالب های سفارشی و فیلتر های داخلی آنها باید توسط متخصص شنوائی شما تعویض شود.

از متخصص شنوائی خود بخواهید تا توصیه های اختصاصی برای نگهداری و سرویس های دوره ای را به شما اطلاع دهد.

اطلاعات بیشتر

اطلاعات ایمنی

برای اطلاعات ایمنی، به دستورالعمل ایمنی ارائه شده به همراه سمعک مراجعه نمایید.

لوازم جانبی

شما می‌توانید از اپلیکیشن گوشی هوشمند برای کنترل و تنظیم سمعک خود استفاده کنید. همچنین با اپلیکیشن می‌توانید صدا را غیرفعال کنید و صدای منحصر بفرد مورد نیاز خود را ایجاد کنید و کلی امکانات و عملکردهای دیگر را داشته باشید. همچنین می‌توانید از ریموت کنترل استفاده کنید. با متخصص شنوایی خود جهت اطلاعات بیشتر مشورت کنید.

علائم استفاده شده

اشاره به موقعیت‌هایی که می‌تواند باعث آسیب شدید، متوسط و یا اندک شود.



نشان دهنده احتمال آسیب رساندن



توصیه و نکات رسیدگی بهتر به وسیله.



علامت ساخته شده برای آیفون، آیبود و آیبود نشان‌دهنده این است که این وسیله الکترونیکی

Made for

iPhone | iPad | iPod

برای ارتباط انحصاری و مختص آیفون طراحی شده است.

آیید یا آیپود ارائه شده توسط اپل استانداردهای عملکردی مورد تایید اپل را پیروی می‌کنند. اپل مسئولیت راه‌اندازی و سازگاری با استانداردهای امنیتی و قانونی این وسیله را ندارد. لطفاً توجه نمائید که استفاده از این وسیله جانبی می‌تواند عملکرد وایرلس را تحت تاثیر قرار دهد.

عیب‌یابی سمک‌ها

مشکلات و راه حل‌های احتمالی

صدا ضعیف است.

- ولوم را زیاد کنید.
 - باتری ضعیف را تعویض کنید.
 - قطعه گوش را تمیز یا تعویض کنید.
-

سمک سوت می‌زند.

- مجدداً قطعه گوش را با اطمینان و محکم داخل گوش قرار دهید.
 - ولوم صدا را کم کنید.
 - قطعه گوش را تمیز یا تعویض کنید.
-

صدا خش دار است.

- ولوم صدا را کم کنید.
 - باتری ضعیف را تعویض کنید.
 - قطعه گوش را تمیز یا تعویض کنید.
-

سمک صدای بوق یا ملودی می‌دهد.

- باتری ضعیف را تعویض کنید.
-

سمعک کار نمی‌کند.

- سمعک را روشن کنید
 - به آرامی در باتری سمعک را ببندید.
 - باتری ضعیف را تعویض کنید
 - دقت کنید باتری را به درستی قرار داده اید.
 - ممکن است زمان تاخیر شروع شدن برای سمعک فعال باشد. چند ثانیه صبر کنید و مجدد بررسی نمایید.
-

اگر با مشکلات دیگری مواجه شدید با متخصص شنوائی خود مشورت کنید.



Legal Manufacturer
Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany
Phone +49 9131 308 0

Document No. 03949-99T02-7600 EN
Order/Item No. 109 684 15
Master Rev01, 07.2019
© 08.2019, Signia GmbH. All rights reserved

www.signia-hearing.com