



Silk X

دفترچه راهنما



دفترچه راهنما

خوش آمدگویی

سمعک شما

سمعک شما

نوع سمعک

آشنایی با سمعک

اجزا و نام آنها

برنامه های شنیداری

ویژگی ها

باتری ها

اندازه باتری و نکات استفاده از آن

تعویض باتری

استفاده روزانه

خاموش / روشن کردن

قرار دادن و برداشتن سمعک

تنظیم ولوم صدا

تغییر برنامه شنیداری

موقعیت‌های خاص شنیداری

در حالت تلفن

مراقبت و نگهداری سمعک

سمعک

قطعات سمعک

تعویض

نگهداری حرفه‌ای

اطلاعات بیشتر

اطلاعات ایمنی

لوازم جانبی

علائم استفاده شده

عیب‌یابی سمعک‌ها

خوش آمدگویی

از انتخاب سمعک‌های ما برای همراهی در زندگی روزانه خود بسیار سپاسگزاریم. درست مثل هر چیز تازه‌ای، مدتی زمان می‌برد تا با آن آشنا شوید. این راهنما، حین حمایت‌هایی که از طرف متخصص شنوایی خود می‌شوید، به شما کمک می‌کند تا مزایا و کیفیت بالای زندگی که سمعک به شما هدیه می‌کند بیشتر دریابید.

برای بهره‌مندی بیشتر از سمعک‌های خود، پیشنهاد می‌شود که آنها را روزانه و در طول روز به طور مرتب استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا با آنها بیشتر عادت کنید.

احتیاط



مطالعه کامل این راهنما و دستورالعمل ایمنی بسیار مهم است. اطلاعات ایمنی را دنبال نمایید تا از آسیب و صدمه جلوگیری کنید.

سمعک شما



این راهنما ویژگی‌هایی را شرح می‌دهد که ممکن است سمعک‌های شما آنها را داشته یا نداشته باشد. از متخصص شنوایی خود بخواهید تا ویژگی‌های صحیح سمعک‌های شما را نشان دهد.

نوع سمعک

سمعک شما مستقیماً داخل مجرای گوش قرار می‌گیرد. این نوع سمعک برای کودکان زیر ۳ سال و افرادی که سن رشدشان زیر ۳ سال است مناسب نمی‌باشد. عملکرد بی‌سیم باعث ایجاد ویژگی‌های شنوایی پیشرفته و همزمانی بین دو سمعک می‌شود.


آشنایی با سمعک

سمعک شما هیچ نوع دکمه کنترلی ندارد.



همچنین شما می‌توانید از متخصص شنوایی خود در مورد امکان استفاده از اپلیکیشن بر روی گوشی هوشمند جهت تنظیم سمعک سوال کنید.

اجزا و نام آنها

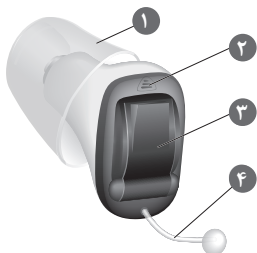

- ۱ قطعه گوش
- ۲ میکروفن
- ۳ در باتری (دکمه خاموش / روشن)
- ۴ پین

شما می توانید از قطعات استاندارد گوش زیر استفاده کنید:

سایز

Standard ear pieces

Click Sleeve (vented or closed)		☐
Click Dome™ single (open or closed)		☐
Click Dome semi-open		☐
Click Dome double		☐

شما می توانید به راحتی قطعات استاندارد گوش را تعویض نمایید. برای مطالعه بیشتر به قسمت "مراقبت و نگهداری" مراجعه کنید.

برنامه های شنیداری

۱
۲
۳
۴
۵
۶

مطالعه بیشتر در قسمت "تغییر برنامه شنیداری"

ویژگی ها

☐ زمان تاخیر روشن شدن باعث حذف سوت هنگام قرار دادن سمعک در گوش می شود.

مطالعه بیشتر در قسمت "روشن / خاموش کردن"

☐ ویژگی درمان وزوز گوش تولید صدا می کند تا حواس شما از وزوز گوشستان پرت شود.

باتری‌ها

وقتی باتری در حال اتمام است صدای سمعک کم شده و شما صدای بوق هشدار را در گوش‌تان می‌شنوید. نوع باتری مدت زمان تعویض آن را مشخص می‌کند.

اندازه باتری و نکات رسیدگی


از متخصص شنوائی خود جهت معرفی باتری‌های سوال کنید.

سایز باتری	۱۰
------------	----

- همواره از سایز باتری صحیح برای سمعک‌های خود استفاده نمائید.
- اگر قصد دارید چندین روز از سمعک‌های خود استفاده نکنید باتری را از سمعک خارج کنید.
- همیشه باتری یدک به همراه خود داشته باشد.
- باتری‌های خالی را فوراً از سمعک خارج نموده و طبق قوانین بازیافت محلی خود باتری‌های مصرف شده را امحاء نمائید.

تعویض باتری

خارج کردن باتری:

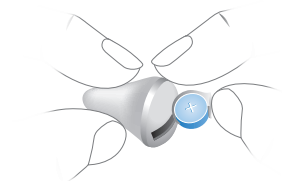

◀ در محفظه باتری را باز کنید.

◀ با دست باتری را خارج کنید.

قرار دادن باتری:



◀ اگر باتری برچسب محافظ دارد قبل از استفاده آن

را از روی باتری جدا کنید.

◀ باتری را در حالتی که قطب + آن رو به بالا باشد

داخل در باتری قرار دهید. (مانند تصویر)



◀ با احتیاط در باتری را ببندید. اگر احساس می کنید به سختی بسته می شود یعنی

باتری به درستی داخل محفظه خود قرار نگرفته است.

به هیچ وجه تلاش نکنید تا در باتری را با زور و فشار ببندید زیرا این کار می تواند به

سمعک آسیب برساند.

استفاده روزانه

خاموش یا روشن کردن

شما می‌توانید با استفاده از روش‌های زیر سمعک خود را خاموش یا روشن نمایید.

از طریق محفظه باتری:

- ◀ روشن کردن: در باتری را ببندید.
- ◀ ولوم و برنامه شنیداری پیش فرض فعال می‌شود.
- ◀ خاموش کردن: در باتری را بصورت نیمه باز کنید.

هنگام قرار دادن سمعک بر روی گوش، یک بوق هشدار نشان می‌دهد که سمعک روشن یا خاموش می‌شود.

وقتی زمان تاخیر روشن شدن فعال باشد، سمعک پس از طی زمان مورد نظر روشن می‌شود.

در این زمان شما فرصت دارید سمعک را بدون نگرانی از سوت زدن بر روی گوش قرار دهید.

زمان "تاخیر روشن شدن" را متخصص شنوایی شما می‌تواند فعالسازی نماید.

قراردادن و برداشتن سمعک

هشدار




خطر آسیب رساندن!

- ◀ همیشه سمعک را با قطعه گوش استفاده کنید.
- ◀ مطمئن شوید که قطعه گوش کامل به سمعک متصل شده باشد.

قرار دادن سمعک:

- ◀ سمعک چپ و راست را به درستی و از روی رنگ آن تشخیص دهید. رنگ سمعک یا برچسب آن گوش مورد نظر را مشخص می‌کند:
 - رنگ قرمز که با R حک شده: گوش راست
 - رنگ آبی که با L حک شده: گوش چپ
- ◀ دقت نمایید که زائده کلیک اسلیو بسمت قسمتی که شماره سریال یا مدل سمعک حک شده است قرار داشته باشد.



صحیح

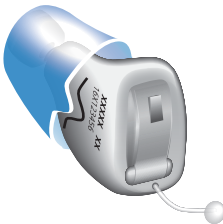

اشتباه



◀ قبل از قرار دادن سمعک را به درستی در دست بگیرید: مخصوصاً دقت نمائید که پین سمعک در قسمت پائین گوش قرار بگیرد. فلش حک شده روی سمعک سمت بالای گوش را نشان می دهد.

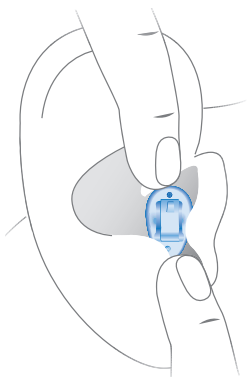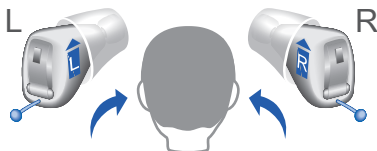

◀ با دقت سمعک را داخل مجرای گوش فشار دهید.

◀ به نرمی بچرخانید تا در جای خود به خوبی قرار بگیرد.

دهان را باز و بسته کنید تا از بسته شدن هوای در مجرای گوش جلوگیری نمائید.

هشدار



خطر آسیب رساندن:

◀ سمعک را با دقت در گوش قرار داده و بیش از حد در عمق مجرای گوش قرار ندهید.



- استفاده از دست راست برای قرار دادن سمعک راست و استفاده از دست چپ برای قرار دادن سمعک چپ می تواند مفید باشد.
- اگر شما در قراردادن قطعه گوش مشکل دارید، می توانید با استفاده از دست دیگر لاله گوش را به سمت عقب بکشید. این کار باعث می شود مجرا گوش باز شده و قطعه گوش را به راحتی داخل مجرا قرار دهید.

برداشتن سمعک از گوش

توجه



به هیچ وجه در باتری را برای در آوردن سمعک از گوش نکشید. با این کار ممکن است سمعک شما آسیب ببیند.

- ◀ پشت لاله گوش را به نرمی فشار داده تا سمعک در گوش شل شود.
- ◀ پین سمعک را گرفته و سمعک را به سمت عقب کشیده و از گوش خارج نمایید.

هشدار



خطر آسیب رساندن:

- ◀ در موارد بسیار نادر هنگام در آوردن سمعک ممکن است قطعه گوش در مجرا بماند.
- ◀ اگر این اتفاق افتاد، قطعه گوش باید توسط پزشک خارج شود.

پس از استفاده از سمعک آن را خشک و تمیز نمایید. مطالعه بیشتر در قسمت "مراقبت و نگهداری"

تنظیم ولوم صدا

سمعک شما بصورت خودکار در موقعیت‌های شنیداری ولوم صدا را تغییر و تطبیق می‌دهد.

◀ اگر شما ترجیح می‌دهید تا بصورت دستی ولوم صدا را تغییر دهید از دکمه الاکلنگی روی سمعک استفاده نمایید.

مراجعه به بخش "کنترل‌ها" برای تنظیم دکمه الاکلنگی تغییرات ولوم می‌تواند همراه با شنیدن یک صدای بوق باشد. همچنین لحظه‌ای که سطح ولوم صدا به حالت حداکثر و یا حداقل می‌رسد شما می‌توانید صدای بوق دیگری را بشنوید.

تغییر برنامه شنیداری


بسته به موقعیت شنیداری که شما در آن قرار دارید سمعک به صورت خودکار صدا را تنظیم می‌کند.

همچنین سمعک شما ممکن است دارای چندین برنامه شنیداری دستی باشد که در صورت نیاز شما می‌توانید آنها را انتخاب کنید تا صداها تغییر کند. صدای بوق مخصوصی شما را از تغییرات برنامه آگاه می‌کند.

◀ برای تغییر برنامه شنیداری از ریموت کنترل استفاده کنید.
به قسمت "برنامه‌های شنیداری" برای لیست برنامه‌های شنیداری مراجعه نمایید.

موقعیت‌های خاص شنیداری

در حالت تلفن

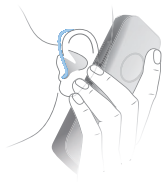

هنگام استفاده از تلفن، بلندگوی تلفن را اندکی بالای گوش بگیرید. تا جایی که بلندگوی تلفن در راستای میکروفن سمعک قرار بگیرد. بلندگوی تلفن را کمی بچرخانید و جوری بگیرید تا کاملاً تلفن روی گوش را نپوشاند.

برنامه تلفن

اگر شما ترجیح می‌دهید تا صدای تلفن را هنگام استفاده از آن بلندتر بشنوید از متخصص شنوایی خود بخواهید تا برای شما برنامه مجرا برای تلفن قرار دهد.

◀ هنگام استفاده از تلفن، سمعک را روی برنامه تلفن قرار دهید.

اگر برنامه تلفن برای سمعک شما تعبیه شده است در قسمت "برنامه‌های شنیداری" لیست شده است.

مراقبت و نگهداری

برای پیشگیری از آسیب دیدن سمعک شما باید از سمعک‌های خود مراقبت کرده و یک سری قاعده ساده را رعایت کنید و یک بخش از روال کار روزانه خود قرار دهید.

سمعک

خشک کردن

- ◀ سمعک‌های خود را در شب خشک کنید.
- ◀ اگر مدت زیادی از سمعک استفاده نمی‌کنید باید در باتری را باز کنید و باتری را از آن خارج کرده و سمعک را در مکانی خشک قرار دهید.
- ◀ اطلاعات بیشتر را از متخصص شنوائی خود بخواهید.

تمیز کردن



- به علت موارد بهداشتی، سمعک‌های خود را روزانه تمیز کنید.
- ◀ سمعک خود را روزانه با یک دستمال نرم و خشک تمیز کنید.
- ◀ هرگز سمعک را زیر شیر آب یا داخل آب قرار ندهید.
- ◀ هرگز موقع نظافت سمعک به آن فشار وارد نکنید.
- ◀ از متخصص شنوائی خود بخواهید تا توصیه‌های بهداشتی، مراقبتی، شرایط نگهداری و نظافت سمعک در بهترین حالت را به شما توضیح دهد.

قطعات سمعک

تمیز کردن

جرم گوش ممکن است روی قطعه گوش انباشته شود. این باعث می شود کیفیت صدا تحت تاثیر قرار بگیرد. قطعه گوش را روزانه تمیز کنید.
برای تمام انواع قطعات گوش:

◀ بعد از در آوردن سمعک از گوش،


قطعه گوش را با یک دستمال

نرم و خشک تمیز کنید.

این کار باعث جلوگیری از

خشک و سفت شدن جرم

گوش روی آن می شود.

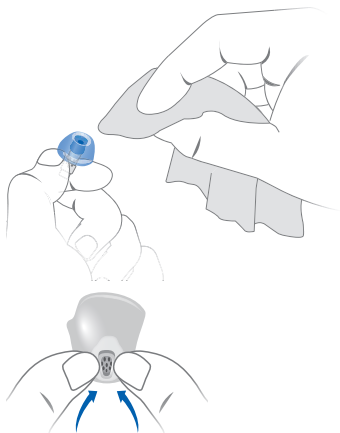


◀ نوک قطعه گوش را فشار دهید.

تعویض

تقریباً هر سه ماه یک بار قطعه گوش را تعویض کنید. اگر ترک یا تغییری در آنها ملاحظه کردید زودتر تعویض کنید. روش تعویض قطعات گوش بسته به نوع آنها می تواند متفاوت باشد. در قسمت "اجزا و نام آنها" متخصص شنوایی شما نوع قطعه گوش شما را مشخص کرده است.

تعویض کلیک اسلیو

کلیک اسلیو را با انگشتان دست گرفته و بیرون بکشید. اگر نشد، کلیک اسلیو را پشت و رو کرده و سپس آن را از سمعک جدا کنید.

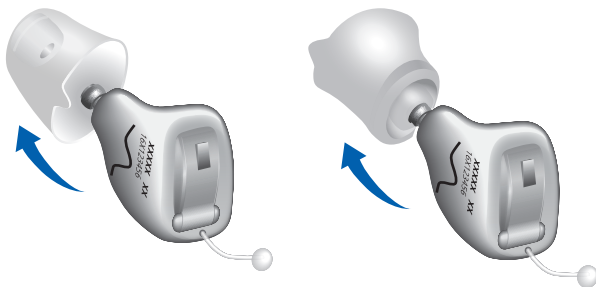


◀ بسیار دقت کنید که کلیک اسلیو محکم در جای خودش قرار گرفته باشد.



◀ هنگام اتصال کلیک اسلیو به سمعک دقت کنید تا زائده آن به سمت شماره سریال حک شده روی سمعک قرار بگیرد.

صحیح

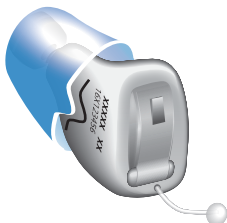


اشتباه



تعویض کلیک دم‌ها

اگر برای در آوردن کلیک دم مشکل دارید مطابق دستورالعمل پشت بسته آن انجام دهید.

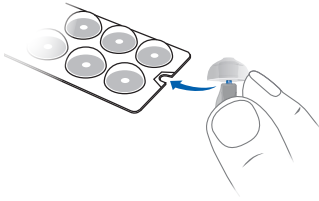

◀ بسیار دقت کنید تا کلیک دم جدید با صدای قابل توجه در جای خود قرار بگیرد.

نگهداری حرفه‌ای

متخصص شنوایی شما نگهداری و مراقبت‌های کامل و حرفه‌ای را می‌تواند انجام دهد. از متخصص شنوایی خود بخواهید تا توصیه‌های اختصاصی برای نگهداری و سرویس‌های دوره‌ای را به شما اطلاع دهد.

اطلاعات بیشتر

اطلاعات ایمنی

برای اطلاعات ایمنی، به دستورالعمل ایمنی ارائه شده به همراه سمعک مراجعه نمایید.

لوازم جانبی

لوازم جانبی مورد نیاز بر اساس نوع سمعک در دسترس می باشد. مثال: ریموت کنترل، رابط انتقال صدای بلوتوث، یا اپلیکیشن موبایل برای تنظیمات صدای سمعک برخی از سمعک ها دارای قابلیت سیستم کراس و بای کراس می باشند که امکان انتقال صدا از سمعک سمت گوش ناشنوا به سمعک گوش مقابل ایجاد می شود. با متخصص شنوائی خود جهت اطلاعات بیشتر مشورت کنید.

علائم استفاده شده

اشاره به موقعیت هایی که می تواند باعث آسیب شدید، متوسط و یا اندک شود.



نشان دهنده احتمال آسیب رساندن



توصیه و نکات رسیدگی بهتر به وسیله.



علامت ساخته شده برای آیفون، آیبود و آیبود نشان دهنده این است که این وسیله الکترونیکی

برای ارتباط انحصاری و مختص آیفون طراحی شده است.

Made for

iPhone | iPad | iPod

عیب یابی سمعک ها

مشکلات و راه حل های احتمالی

صدا ضعیف است.

- در باتری را به نرمی و کامل ببندید.
- سمعک را تمیز کنید.
- باتری ضعیف را تعویض کنید.
- قطعه گوش را تمیز یا تعویض کنید.

سمعک سوت می زند.

- سمعک را با اطمینان و محکم داخل گوش قرار دهید.
- قطعه گوش را تمیز یا تعویض کنید.

صدا خش دار است.

- باتری ضعیف را تعویض کنید.
- قطعه گوش را تمیز یا تعویض کنید.

سمعک صدای بوق یا ملودی می دهد.

- باتری ضعیف را تعویض کنید.

سمعک کار نمی‌کند.

- سماع را روشن کنید
 - به آرامی در باتری سماع را ببندید.
 - باتری ضعیف را تعویض کنید
 - دقت کنید باتری را به درستی قرار داده اید.
 - ممکن است زمان تاخیر شروع شدن برای سماع فعال باشد. چند ثانیه صبر کنید و مجدد بررسی نمایید.
-

اگر با مشکلات دیگری مواجه شدید با متخصص شنوائی خود مشورت کنید.



Legal Manufacturer

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Germany

Phone +49 9131 308 0

Document No. 04115-99T01-7600 EN

Order/Item No. 109 767 11

Master Rev01, 12.2019

© 01.2020, Signia GmbH. All rights reserved

www.signia-hearing.com